

定量免疫法糞便檢體採集步驟

How To Collect Stool Sample

STEP 1 採集說明

檢體清楚的標
示姓名與採便
的日期、時間

Write your name, date
and time on sampling bottle




1. 旋開瓶蓋
2. 向上拔開



STEP 2 採集說明

糞便儘量
避開沾到水

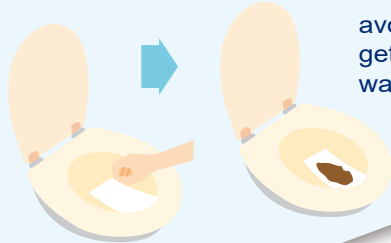


avoid stool
getting into
water

STEP 3 採集說明

Scrape from the surface of stool

如圖示在整條
糞便上以輕劃的
方式在表面不同
部位上刮取

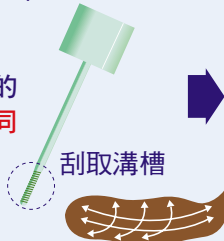


刮取溝槽

刮取量約為
刮取溝槽完
全覆蓋即可

STEP 4 採集說明

插入採檢管後
將蓋子用力壓緊
切勿重覆採集

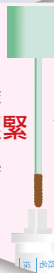

有“喀”一聲
才有緊蓋

After inserting the
collection tube
Firmly press the lid.
Once inserted,
do not unplug



放入採便管
專用綠色夾
鏈袋（冷藏儲
存）儘速交回
指定單位

注意事項（Precautions）：

- 按照上面圖解採集糞便檢體，完成放入夾鏈袋中並冷藏儲存。
Collect the stool sample as shown above, put it into the zipper bag and keep in refrigerated storage.
- 勿將管中的液體倒出、或任意於管中加水。
Do not pour out the liquid or add water to the sampling bottle.
- 遇痔瘡出血或女性月經期間，暫緩採便。
Do not collect sample during bleeding hemorrhoids or menstrual period.

※ 請珍惜醫療資源，將採集完畢之容器儘速交回指定醫療院所或衛生所。
Return the collected container to the medical institutions as soon as possible.